

Pirka postoperatiiviset hoitokengät

Suomessa valmistettu, asiantuntijoiden kanssa kehitetty

A smiling man with a beard, wearing blue scrubs, is the central figure. He points his right index finger towards a large, detailed image of a black postoperative shoe with two straps and a thick sole. His left hand holds the same shoe from underneath. Behind him is a grid of 24 smaller images showing various models of postoperative shoes, including different colors (black, red) and designs (some with straps, some with buckles). The background is a light blue gradient.

Finbort Oy

*Hyvinvointia ja terveyttä
päivittäiseen liikkumiseen
vuodesta 1993.*

Pirka postoperatiiviset hoitokengät

HOITOKENKÄ = välittömästi hoitoyksikössä annettava tilapäiseen käyttöön tarkoitettu tehdasvalmisteinen kenkä, joka immobilisoi jalkavaurion (murtuma, haava, leikkaus tms.) ja keventää sitä.

Tuote nro S 210 tasapohjainen



- Soveltuu käytettäväksi kaikissa kevennys-hoidoissa.
- Helpon käveltävyyden vuoksi sopii hyvin ikä-ihmisille ja tasapaino-ongelmista kärsiville.

Tuote nro S 211 takaa kevennetty



- Kantapään alueen kevennys-hoidot.

Tuote nro S 212 ja S 213 edestä kevennetty



S 212 Päkiänaalueen kevennys-hoidot.

S 213 HALLUX-VALGUS-operaatioiden jälkihoitoon.

- 3 mm lunapohja täysliimattu.

Tuote nro S 215 lyhennetty etukevennys



- Ykkösvarpaan kevennys-hoidot.

Tuote nro S 216 edestä kevennetty kiilapohja



- Päkiänaalueen kevennys-hoidot.
- Jalka pysyy stabiilina erittäin hyvin.
- Tehokkaasti keventävä.

Tuote nro 310 varrellinen tasapohjainen



- Soveltuu käytettäväksi kaikissa kevennys-hoidoissa.
- Helpon käveltävyyden vuoksi sopii hyvin ikä-ihmisille ja tasapaino-ongelmista kärsiville.

Tuote nro 311 varrellinen takaa kevennetty



- Kantapään alueen kevennys-hoidot.
- Jalka pysyy stabiilina erittäin hyvin.
- Tehokkaasti keventävä.

Tuote nro 312 varrellinen edestä kevennetty



- Päkiänaalueen kevennys-hoidot.

Tuote nro 315 varrellinen lyhennetty etukevennys



- Ykkösvarpaan kevennys-hoidot.

Tuote nro 316 varrellinen edestä kevennetty kiilapohja



- Päkiänaalueen kevennys-hoidot.
- Jalka pysyy stabiilina erittäin hyvin.
- Tehokkaasti keventävä.

Mallit S 210–316 saatavana myös:



UMPIKÄRKISENÄ
tilaukseen merkintä UK
(esim. S 210 UK)



AVOKANTA
tilaukseen merkintä AK
(esim. S 211 AK tai
S 211 UK + AK)



**Mallit S 210 – S 216
saatavana myös
kolmitarraisina.**
Tilaukseen merkintä *esim.* 210
(Ilman S-etuliitettä kengät
tehdään kolmitarraisina.)

Tuote nro 410 varrellinen tasapohjainen



- Varvasamputaatio- ja ihonsiirtopotilaille sekä muille jalkateräalueen kevennyshoitoihin.
- Soveltuu hyvin myös lasten kipsikengäksi.

Tuote nro 410 AK+ varrellinen, tasapohjainen, laajennetulla avokannalla.



- Käytetään erityisesti akillesjänneleikkausten jälkihoitoon.

Tuote nro 416 varrellinen kiilapohja



- Varvasamputaatio- ja ihonsiirtopotilaille sekä muille jalkateräalueen kevennyshoitoihin.

Kokotaulukko malleille S 210 – 316

*XS = 21,5 cm / 32	XL = 27,0 cm / 41
S = 22,5 cm / 34	XXL = 28,5 cm / 43
M = 24,0 cm / 36	XXXL = 30,5 cm / 46
L = 25,5 cm / 38,5	*XXXXL = 32 cm / 48

* Ei saatavana kaikkiin malleihin.

cm = hoitokengän sisäpohjan pituus.

Kokotaulukko malleille 410, 410 AK+ sekä 416

Päkiän leveys cm / sisäpohjan pituus cm

XS 8,5 cm / 18,5	XL 10,0 / 24,5
S 9,0 / 20,0	XXL 10,5 / 26,0
M 9,5 / 21,5	XXXL 11,0 / 27,5
L 10,0 / 23,0	

Kenkien perusväri on **musta**. Erikseen tilaamalla saatavilla myös **tummansininen**, **punainen** ja **beige**.

Kipsikengät

Tuote nro S 214



- Kipsikengä sekä erilaiset kevennyshoidot
- Kangas- tai nahkapäällinen
- Saatavana avo- tai umpikärkisenä mallina.
- Saatavana myös kolmitarraisena.

Tuote nro S 214 UK nahka



Tuote nro S 214 UK kangas



Tuote nro C 100 kipsin suojakenkä

- Mikronahka



Kokotaulukko malleille S 214 ja C 100

Päkiän leveys cm / sisäpohjan pituus cm

S = 10,0 / 23,0
M = 10,0 / 24,5
L = 10,5 / 26,0
XL = 11,0 / 27,5
XXL = 11,5 / 29,0
XXXL = 11,5 / 31,0

Evenup korotuspohja


- Helppokäyttöinen korotuspohja kaikkiin kenkiin tasa-painottamaan korkeuseroa, kun toisessa jalassa on erikois pohjallinen kenkä.



TILAUSNUMERO:

06556	koko S	37 – 39
06556A	koko M	40 – 43
06556B	koko L	44 – 48

Luna-pohjallinen: 3, 6, 8, 12 mm

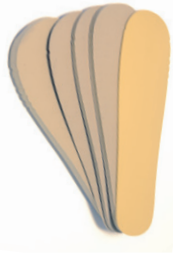

- Vakio Luna-pohjallisen paksuus on 6 mm ja mallissa **S 213** 3 mm.
- Luna-pohjallinen on liimattu tarraliimauksena reunoilta, jolloin pohjallinen irtoaa helposti ja siihen on helppo tehdä yksilöllisiä kevennyksiä. Poikkeuksen tekee malli S 213, jos pohjallinen on täysliimattu.
- Myös muihin malleihin on mahdollista saada täysliimaus **erikseen tilaamalla**.
- Lisäkevennyksenä Luna-pohjallisen päälle suositellaan käytettäväksi Poron-pohjallista.
- Hoitokenkä sopii molempiin jalkoihin.
- Tarroitus voidaan tilata myös erikseen vasemman tai oikean kengän tarroituksella.

Käyttö- ja pesuohjeet

KÄYTTÖOHJE:

- Pirka hoitokengän on oltava käyttötarkoitukseen soveltuva.
- Tarkista, että hoitokenkä on **OIKEAN KOKOINEN**.

HUOM! Hoitokengässä on **AINA OLTAVA POHJALLINEN!**
Luna tai vastaava

HOITOKENGÄN OIKEA KÄYTTÖ TULEE OPETTAA.

- Hoitokenkää ei kuormiteta kuten tavallista kenkää, sille varataan osapainolla.
- Etukevennteisellä kengällä (S 212/S 213/312) painopiste on kantapäällä, ei tehdä rullausta loppuun saakka.
- Takakevennteisellä kengällä (S 211/311) painopiste tulee jalan etuosalle, voidaan tehdä rullausaskellus.
- Hoitokenkää käytetään mielellään kyynärsauvojen kanssa, jolloin se toimii parhaiten käyttötarkoituksensa mukaisesti.
- Hoitokengän ulkopohja voi olla liukas kosteilla lattiapinnoilla ja talvella ulkona liikuttaessa.

MATERIAALI:

Päällinen hengittävä, likaa hylkivä ja kulutusta kestävä puuvilla-polyesterikangas. Ulkopohja polyuretaani tai solukumi. Kipsikengissä myös nahka- tai mikronahkapäällinen.

PESU:

- ☒ Konepestävä + 40 C
- ☐ Tasokuivaus huoneenlämmössä.
- ☒ Ei linkousta, kuivauskaappia tai kuivausrumpua.
- ☒ Ei kloorivalkaisua.

- Kenkiä ei saa jättää märkinä koneeseen tai pyykkikoriin päällekkäin.
- Tarrat kiinni pestäessä.
- Jos KANTAKAPPI on menettänyt muotonsa pesussa, voit muotoilla sen lämpimänä uudestaan.
- Kengät kestävät useita pesukertoja oikein huollettuna.
- Tarkista kierrätettyjen hoitokenkien kunto säännöllisesti.
- Kengän ulkopohjassa pitää olla riittävästi kulutuspintaa, virheetön kantakappi ja pitävät tarranauhat.
- **POISTA KÄYTÖSTÄ RYHDITÖN KENKÄ JA HANKI TILALLE UUDET.**



KOLMITARRAISEN HOITOKENGÄN TARRANAUHOJEN KIINNITYS



1. Jalassa avattuna 2. Kiinnitetään 3. Valmis



Pirka kevennyskenkä, Evenup korotuspohja ja lisäkevennys kyynärsauvoilla.

TILAUKSET, TIEDUSTELUT JA ESITTELYT:

Finbort Oy

finbort@elisanet.fi
Puh. 0400 840 575
www.finbort.fi
Tykkitiekatu 2A2, 33300 Tampere